



ALTAMENTE  
TRASPIRANTE



ELASTICIZZATO IN  
4 DIREZIONI



SENZA  
CUCITURE



COMPLETAMENTE  
APRIBILE



SENZA  
LATTICE

# CINTURA DI SUPPORTO PER STOMIA ED ERNIA

CINTURA DI SUPPORTO



PER I TUOI ORDINI ONLINE  
[WWW.CURA-STOMIA.IT](http://WWW.CURA-STOMIA.IT)



**324 7434020**

Numero Verde

**800-960441**

## Informazioni sulla cintura di supporto

- ✕ OFFRE DISCREZIONE E SOLLIEVO DALLA SENSAZIONE DI TENSIONE
- ✕ MORBIDA, SENZA CUCITURE E TRASPIRANTE PER UN COMFORT OTTIMALE
- ✕ MASSIMO SUPPORTO PER UNA GESTIONE OTTIMALE DELL'ERNIA
- ✕ TASCA PER FACILITARE L'APPLICAZIONE

OEKO  
TEX®

STANDARD  
100

6234-7001  
DTI

EUROPEAN-BASED PRODUCTION  
FOR OPTIMAL QUALITY,  
SUPPLY CHAIN EFFICIENCY  
AND FLEXIBILITY



**Corsinel®**

by Tytex



**CORSINEL CINTURA DI SUPPORTO**  
NUMERO ARTICOLO: 3519


**COLORI DISPONIBILI**



**COMPOSIZIONE**

54 % PA, 20 % CO,  
13 % EA, 5 % PP


**LAVAGGIO**

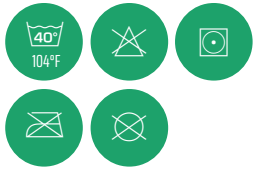

- Chiudere la chiusura a strappo prima del lavaggio
- Lavare con colori simili e in un sacchetto per il bucato
- L'uso di candeggina a base di cloro o di disinfettanti a base di cloro ridurrà la durata e la funzionalità



**TAGLIE DISPONIBILI**

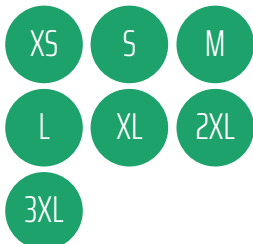

**GAMMA DI PRODOTTI**

Cintura 20 cm, art. n. 3519

**NOTA**

Per un maggior sostegno scegli una taglia in meno, per un minor sostegno scegli una taglia in più

**IMPORTANTE:** Misura sempre la circonferenza addominale nel punto più ampio per scegliere la taglia giusta.

**INFORMAZIONI SUI PRODOTTI**

Le cinture Corsinel sono progettate per fissare, sostenere e contenere stomie ed ernie addominali. Offrono il massimo supporto per alleviare la fastidiosa sensazione di tensione dell'ernia, facilitando lo svolgimento delle attività quotidiane e faticose.

L'utilizzo della cintura contribuisce inoltre a un aspetto più curato, garantendo discrezione e favorendo la partecipazione alla vita sociale. Le cinture sono elasticizzate in quattro direzioni, adattandosi perfettamente al contorno del corpo. Il materiale delicato sulla pelle previene reazioni allergiche, arrossamenti o irritazioni. La lavorazione a maglia senza cuciture offre un comfort ottimale. Le cinture sono progettate per essere indossate tutto il giorno.

**CARATTERISTICHE**

- Massimo supporto per una gestione ottimale dell'ernia
- La lavorazione a maglia 100% senza cuciture previene le irritazioni cutanee per il massimo comfort
- Modello anti-arrotolamento in silicone M 2XL
- Elasticizzata in 4 direzioni per un supporto ottimale e libertà di movimento
- Materiale traspirante e permeabile all'umidità
- Priva di lattice e lavorazione a maglia 100% senza cuciture, per prevenire le irritazioni cutanee per il massimo comfort
- Testato per sostanze nocive secondo lo standard Oeko-Tex 100
- Tasca facile da applicare e ampia chiusura a strappo per la regolazione del livello di supporto
- Taglio posteriore basso

**INDICAZIONI**

Per uso post-operatorio dopo il confezionamento di una colostomia, un'ileostomia o un'urostomia. Per il trattamento di ernie parastomali o di altre ernie addominali. Per l'uso con sistemi mono e 2 pezzi.

**PRECAUZIONI**

- Seguire le istruzioni per l'uso
- Seguire le indicazioni del medico o dell'infermiere stomaterapista
- Utilizzare il dispositivo secondo le indicazioni per evitare lesioni o danni
- Assicurarsi che il dispositivo non comprometta la stomia e/o le funzioni polmonari
- Se l'ernia è irriducibile (non può essere riposizionata con la manipolazione), consultare l'infermiere stomaterapista prima di utilizzare il dispositivo
- In caso di fastidio inatteso, irritazione della stomia o della pelle, rimuovere il dispositivo
- In caso di necessità urgente di rimozione del dispositivo, aprirlo con le forbici
- Le taglie si sovrappongono: se la circonferenza addominale è compresa tra due taglie, scegliere la taglia più piccola se si preferisce un indumento più aderente, e la taglia più grande se si preferisce un indumento meno aderente.
- Assicurarsi che l'indumento sia comodo da indossare sia da seduti che in piedi.
- Il dispositivo può contenere agenti ammorbidenti e antistatici fino all'1,5%

**TAGLIE RACCOMANDATE**

20 CM

SIZE	CM	IN
XS	74 - 82	29 - 32
S	78 - 90	31 - 35
M	86 - 98	34 - 39
L	94 - 106	37 - 42
XL	102 - 116	40 - 46
2XL	112 - 130	44 - 51
3XL	126 - 148	50 - 58



Misura sempre la circonferenza addominale nel punto più ampio per scegliere la taglia giusta.

**PER I TUOI ORDINI ONLINE**  
[WWW.CURA-STOMIA.IT](http://WWW.CURA-STOMIA.IT)

